

POKYNY PRE ZÍSKANIE KRVNEJ VZORKY

Pred začatím odberu krvi si starostlivo prečítajte celý postup.
Uchovávajte mimo dosahu detí.



OBSAH:

PREPRAVNÁ SKÚMAVKA

Obsahuje absorpčný bavlnený tampón

STERILNÝ TAMPÓN

NÁPLAŠŤ



SKÚMAVKA NA ODBER KRVÍ/ODBERNÁ SKÚMAVKA

Iba na jednorazové použitie. Vyrobené a označené (CE) v súlade so smernicou 93 / 42EEC od Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester, LE4 1AW.

BEZPEČNOSTNÉ LANCETY

Lanceta na pichnutie do prsta. Sterilná. Iba na jedno použitie. Farba sa môže líšiť. Vyrobené a označené [CE 1008] v súlade so smernicou 93 / 42EEC od MediPurpose Pte Ltd Singapur.

VRECKO NA ODPAD

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE VZORKY / FORMULÁR

PLASTOVÁ SPIATOČNÁ OBÁLKA

POSTUP

1. Umyte si ruky v teplej vode, zmäkčí to pokožku a podporí krvný obeh, čo následne uľahčí odber.
2. Vyberte malú skúmavku na odber krvi z prepravnej skúmavky.
3. Odstráňte uzáver zo skúmavky na odber krvi.
Poznámka: väčšia prepravná skúmavka obsahujúca absorpčný bavlnený tampón NESMIE byť použitá na odber krvi!
4. Vyberte prst alebo palec, z ktorého chcete odobrať krv, utrite ho priloženým sterilným tampónom a nechajte uschnúť .
5. Odstráňte ochranný kryt z bezpečnostnej lancety.
6. Priložte vyvýšený koniec bezpečnostnej lancety na prst. Pevne zatlačte, aby sa aktivoval mechanizmus lancety. V momente kontaktu s pokožkou môžete pocítiť ľahké pichnutie.
7. Jemne masírujte prst smerom k miestu vpichu, aby ste získali kvapku krvi.
8. Prejdite prstom cez okraj skúmavky určenej pre odber krvi tak, aby sa krv dostala do skúmavky. Pokračujte v odbere, až kým krv dosiahne BIELU ČIARU vyznačenú na skúmavke.*
9. Ak ste odobrali dostatočné množstvo krvi, umiestnite uzáver späť na skúmavku pre odber krvi.
10. Napíšte svoje meno na štítok prepravnej skúmavky, umiestnite skúmavku pre odber krvi dovnútra prepravnej skúmavky a nasadte uzáver.
11. Vyplňte Žiadosť o vyšetrenie vzorky a Záznam o informovanom súhlase.
12. Vložte použitú lancetu (γ) do vrečka na odpad a vložte späť do plastového uzatvárateľného vrečka spolu s prepravnou skúmavkou a žiadosťou o vyšetrenie vzorku.
13. Umiestnite uzatvárateľné vrečko do plastovej spiatočnej obálky a pošlite čo najskôr na adresu:

HEVIX spol. s r. o.
Púpavová 2
Bernolákovo
900 27

* V prípade, že sa prietok krvi zastaví skôr, než je skúmavka na odber krvi plná, je nevyhnutné použiť druhú bezpečnostnú lancetu na odobratie krvi z iného prsta. 577-14-01



Cambridge Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire, United Kingdom, CB6 1SE

T +44 (0) 1353 863279 **F** +44 (0) 1353 863330 **E** info@camnutri.com **W** www.camnutri.com

A SUBSIDIARY OF OMEGA DIAGNOSTICS GROUP PLC. AN ISO 9001 AND ISO 13485 CERTIFIED COMPANY